



Protocole Kit de prélèvement ou auto-prélèvement vaginal dans le cadre du dépistage du cancer du col de l'utérus




1 Ouvrez l'étui de l'écouvillon seulement au moment de son utilisation en veillant à ne rien toucher avec la pointe de l'écouvillon

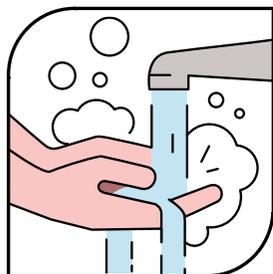


2 Lavez-vous les mains soigneusement

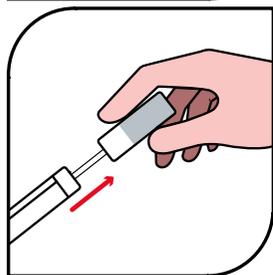


3 Enlevez l'embout de l'écouvillon

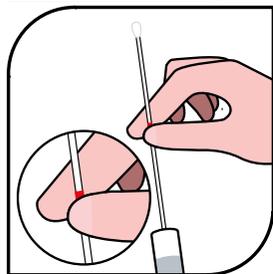


4 Prenez en main la tige de l'écouvillon au niveau de la **marque rouge**

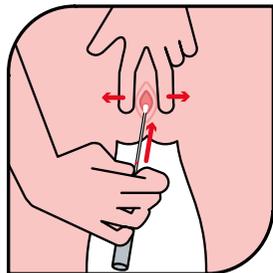

5 Choisissez une position confortable et introduisez l'écouvillon dans votre vagin par sa pointe **jusqu'à la marque rouge (tenue par vos doigts)**

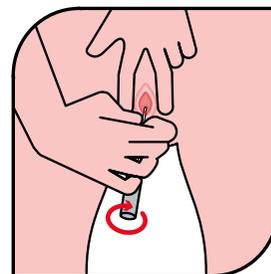

6 Faites tourner l'écouvillon par rotation sur lui-même pendant **10 à 30 secondes**

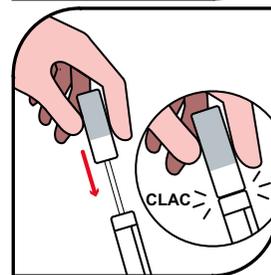

7 Retirez l'écouvillon et le placer dans le tube. Refermez le tube, un « **clac** » doit se faire entendre



8 Restituez ce prélèvement au **laboratoire de biologie médicale** qui vous a remis ce kit.

L'échantillon prélevé peut être conservé dans le tube à **température ambiante**.

Si vous réalisez le prélèvement à domicile, veuillez ramener votre prélèvement au laboratoire **dans les meilleurs délais**.

Veillez à ce que le tube **ne s'ouvre pas** lors du transport.

Visionnez ce protocole en vidéo

