

Protocole Mycobactéries

Pour tout envoi de mycobactéries :

- Remplir le bon de demande spécifique disponible sur chaque fiche Analyses du Référenciel des examens de biologie médicale en ligne sur > www.eurofins-biomnis.com

Les conditions de transport sont :

- **Envoi de souches** : transport à T° ambiante, en triple emballage dans les diagnobox prévus à cet effet.
- **Envoi de prélèvements cliniques**, et pour toutes natures de prélèvement en sachet violet, +2 °C à +8 °C.
- **Envoi de LCR** : utiliser un petit tube conique vissé en sachet violet, +2 °C à +8 °C.



Pour des raisons de sécurité, ne seront pas acceptés :

- Les seringues montées avec aiguille, les flacons ou tubes avec tubulures, les tubes non étanches.

Il est recommandé d'utiliser les tubes à bouchons vissés

(de préférence type Falcon 50 mL).

Ne pas utiliser de milieux de transport, ni de milieux gélosés pour les écouvillons.

Les prélèvements d'urines doivent être conditionnés dans des Falcon de 50 mL.

POUR TOUTE QUESTION

Secrétariat Médical Infectieux : **04 72 80 73 99**

M. Ponsoda - Responsable Technique du Service : **04 72 80 25 26**

Dr. Giacomo - Chef de Service de Microbiologie Clinique : **04 72 80 47 43**