




4 - 25 °C

1

**CONTENU DU KIT : 4 tubes spécifiques pour prélèvement sanguin**

- Témoin négatif = **tube gris**
- Antigène TB1 conçu pour stimuler les lymphocytes CD4 = **tube vert**
- Antigène TB2 conçu pour stimuler les lymphocytes CD4 et CD8 = **tube jaune**
- Témoin positif avec mitogène = **tube violet**

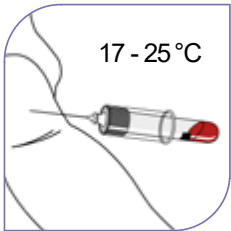


17 - 25 °C

2

**Prélever le sang par ponction veineuse. Remplir les 4 tubes jusqu'à la marque noire (1ml).**

NB : En cas d'utilisation d'une épicroânienne, purger préalablement la tubulure avec un tube sec.

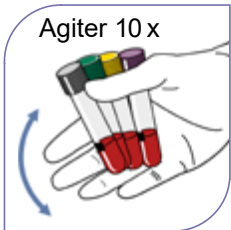


Agiter 10 x

3

Le délai entre le prélèvement et le traitement pré-analytique (agitation, incubation) doit être le plus court possible (optimal < 4h, maximal < 16h) et à température ambiante.

**Au laboratoire, agiter vigoureusement les tubes 10 fois** pour que toute la surface du tube soit recouverte de sang et solubilise les composants fixés sur la paroi.

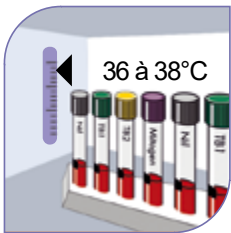

36 à 38 °C


4

**Incuber les tubes verticalement de 36 à 38°C pendant 16h à 24 heures.**

5

**Après l'incubation, centrifuger les tubes (par exemple : 15 min entre 2000 et 3000 g).**

Vérifier que le gel séparateur s'est correctement positionné entre les globules rouges et le plasma. Ne pas ouvrir ou décanter les tubes.

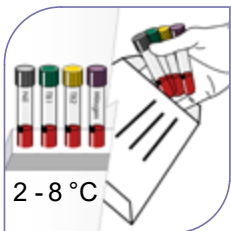

2 - 8 °C

6

**Conserver et envoyer les tubes entre +2 °C et +8 °C (Stabilité 4 semaines).**

**Merci de renseigner le contexte, cocher le code correspondant à la demande et nous retourner ce bon**

Nom du patient : ..... Prénom : ..... Date de naissance : [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

<input type="checkbox"/> Enfant migrant de moins de 15 ans <input type="checkbox"/> Patient infecté par le VIH <input type="checkbox"/> Avant la mise en route d'un traitement par anti-TNF <input type="checkbox"/> Dans un contexte de prise en charge pluridisciplinaire, aide au diagnostic de tuberculose paucibacillaire en cas de diagnostic difficile chez l'enfant ou de tuberculose extra pulmonaire. <input type="checkbox"/> Si exposition documentée à un cas index : enquête autour d'un cas index. (uniquement si > 15 ans)	<input type="checkbox"/> <b>QANR</b> Analyse prise en charge = remboursée
--	--

<input type="checkbox"/> Personnel professionnellement exposé à l'embauche <input type="checkbox"/> Toute autre situation	<input type="checkbox"/> <b>QANH</b> Analyse non prise en charge = non remboursée
--	--

**LES TUBES NON INCUBÉS ET/OU NON CENTRIFUGÉS NE SERONT PAS ACCEPTÉS.**