


**1**

**Recueillir** un échantillon adéquat de la zone de jonction du col utérin à l'aide de la brosse, dont la zone centrale doit explorer le canal endocervical.

La brosse doit être appuyée suffisamment pour permettre le contact étroit avec la région exocervicale. Appuyer doucement puis tourner 5 fois dans le sens horaire (2 tours ½ complets).


**2**

**Rincer** la brosse dans le flacon contenant la solution de conservation (PreservCyt® solution) en pressant une dizaine de fois les poils contre le fond du flacon, puis agiter la brosse vigoureusement pour détacher le reste des cellules recueillies. Jeter la brosse.

**⚠ NE PAS LAISSER LA BROSSE DANS LE FLACON.**


**3**

**Visser** le flacon de telle sorte que le trait noir sur le capuchon dépasse le trait sur le flacon.


**4**

**Identifier** lisiblement le **nom et le prénom** de la patiente sur le flacon (IMPERATIF pour le respect des normes qualité en vigueur).

## A faire

- En cas de présence excessive de mucus, il convient de le retirer délicatement avant le prélèvement.
- Ne pas mettre d'étiquette sur la partie sans étiquette du flacon d'échantillon afin que le contenu soit visible.
- Envoyer sans attendre les échantillons au laboratoire.
- Les échantillons menstruels doivent être évités autant que possible.

## ⚠ A ne pas faire

- **NE PAS** détacher la tête de la brosse Cervex dans le flacon.
- **NE PAS** utiliser la brosse endocervicale de manière isolée (ne pas trop la tourner ¼ ou ½ tour dans un seul sens).
- **NE JAMAIS** utiliser une spatule en bois.
- **NE PAS** utiliser de lubrifiant.
- **NE PAS** laisser le dispositif de prélèvement dans le flacon pendant l'examen de la patiente.
- **NE PAS** visser trop fort le capuchon sur le flacon.
- **NE PAS** utiliser de flacons périmés.