

Note d'information

Séquençage de l'exome : Préparation et envoi des prélèvements

Préparation de vos envois en **2** étapes :

Nous mettons à votre disposition un **bon de demande d'analyses spécifique (Réf. B34)¹** et un **modèle d'attestation /consentement (Réf. D43)²** que nous vous recommandons d'utiliser. En effet, ils reprennent l'ensemble des informations indispensables **à la prise en charge dans les meilleures conditions** de vos demandes d'examen.

1 Check list - Cas Index

- Prélèvement du patient (Prélèvement à privilégier : 5mL Sang Total EDTA - Température ambiante / Autres matrices : merci de consulter notre référentiel des examens sur www.eurofins-biomnis.com)
- Prescription médicale
- Attestation de consultation signée par le prescripteur
- Consentement signé par le patient ou ses représentants légaux
- Renseignements cliniques (dont arbre généalogique)
- Résultats des tests génétiques déjà réalisés
- Dossier et prélèvement à inclure dans un sachet
- Sachet à insérer dans l'enveloppe de transport dédiée (Réf. K34)³

**Inclus dans
le bon de demande
B34¹**



2 Check list - par apparenté

OPTION A : Envoi du prélèvement du ou des apparentés avec le prélèvement du cas index

- Prélèvement (5mL Sang Total EDTA - Température ambiante)
- Prescription médicale
- Copie du bon de demande "Exome" (Réf. B34)¹ du cas index avec rubrique "Informations relatives aux apparentés" dûment renseignée
- Attestation de consultation signée (Réf. D43)²
- Consentement signé (Réf. D43)²
- Dossier(s) et prélèvement(s) à insérer dans un sachet (autant de sachet que d'apparenté)
- Sachet(s) à inclure dans l'enveloppe de transport dédiée (Réf. K34)³ avec le sachet du cas index

OU

OPTION B : Envoi du prélèvement du ou des apparentés a posteriori de celui du cas Index

- Prélèvement (5mL Sang Total EDTA - Température ambiante)
- Prescription médicale
- Copie du bon de demande "Exome" (Réf. B34)¹ du cas index avec rubrique "Informations relatives aux apparentés" dûment renseignée
- Attestation de consultation signée (Réf. D43)²
- Consentement signé (Réf. D43)²
- Dossier(s) et prélèvement(s) à insérer dans un sachet (autant de sachet que d'apparenté)
- Sachet(s) à inclure dans l'enveloppe de transport dédiée (Réf. K34)³

^{1, 2, 3} Références disponibles sur votre commande en ligne de matériel Eurofins Biomnis Connect

connect.eurofins-biomnis.com

Vous n'êtes pas Correspondant Eurofins Biomnis, contactez notre service commercial
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
Tél : 04 26 70 02 33
commercial@biomnis.eurofinseu.com

Séquençage de l'exome : Préparation et envoi des prélèvements

Envoi des prélèvements

Le test Exome bénéficie d'un **flux logistique robuste et spécifique** permettant une réception des prélèvements et un enregistrement des dossiers directement sur notre site de Lyon, site où l'analyse est réalisée et interprétée.

En pratique








Matériel à utiliser

Pour permettre cet aiguillage logistique sur notre site de Lyon, il est indispensable d'utiliser **l'enveloppe de transport fournie dans le kit K34** (cf. Préparation des envois en page 1).




Suivi des prélèvements

Cette enveloppe de transport est équipée d'une étiquette datamatrix vous permettant **la traçabilité de l'envoi** tout au long de la chaîne logistique jusqu'à l'arrivée dans notre laboratoire.


<p>→  0012200020315</p> <p>→  0012200020315</p>	<p>→ Un numéro de traçabilité unique par enveloppe</p>
<p>→  Réservé logistique 0012200020315</p> <p>→  0012200020315 A conserver par l'expéditeur</p>	<p>→ Une partie détachable à conserver par le laboratoire transmetteur</p>
<p>→  A coller sur B.D.A. 0012200020315</p>	<p>→ Une partie détachable à coller sur le bon de demande d'analyses</p>

Le suivi des prélèvements est disponible **à tout moment** via l'espace Correspondant Biomnis Connect grâce au numéro de traçabilité de l'enveloppe.


Suivi d'un sachet

 Filtrer

Par numéro de sachet :

Par date d'enlèvement : 

Par code correspondant :





A noter

- Il n'est pas nécessaire de prévenir le laboratoire Eurofins Biomnis de vos envois en dehors du tout premier.
- Les dossiers d'exomes prénataux sont automatiquement et systématiquement traités en priorité.

Contact

Pour toutes autres questions concernant l'envoi des prélèvements d'exome, vous pouvez contacter notre secrétariat à Exome.Secretariat@biomnis.eurofinseu.com